

# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME TÉCNICO: BROCAS CIRÚRGICAS ODONTOLÓGICAS**

**NOME COMERCIAL: FERRAMENTAS PARA DRILL SETORMED**

**Fabricante:**

Setormed Indústria e Comércio de

Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A.

Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP

CEP: 13570-410

CNPJ: 13.533.397/0001-29 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: [www.setormed.com.br](http://www.setormed.com.br)

Telefone: (16) 3416-5398

**Responsável Técnico:**

Antonio C. B. Pontim – CREA-SP 0601343684

**REGISTRO ANVISA Nº 80777280014**

**PRODUTO ESTÉRIL**

**Características e especificações técnicas do produto**

**Nome Técnico:** Brocas Cirúrgicas Odontológicas

**Nome Comercial:** Ferramentas para Drill Setormed

**Matéria Prima:** Aço Inoxidável ASTM F899-XM16

**Produto Estéril**

**Método de Esterilização:** Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

Legenda dos símbolos utilizados na rotulagem, conforme ISO 15223-1:













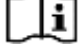

1	Data de fabricação		8	Não reutilizar	
2	Validade		9	Limite superior de temperatura	
3	Manter afastado de luz solar		10	Limite de umidade	
4	Frágil, manusear com cuidado		11	Manter seco	
5	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		12	Número de catálogo	
6	Esterilizado utilizando óxido de etileno		13	Código do lote	
7	Consultar instruções para utilização		14	Fabricante	

Figura 01: Simbologia da Rotulagem.

**1. Forma de Apresentação Comercial do Produto**

AS FERRAMENTAS PARA DRILL SETORMED são apresentadas em embalagens que contém 1 FERRAMENTA, acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Embalagem termosselável tipo sachê em papel grau cirúrgico (gramatura)70gr/m2 com e filme plástico laminado (Polipropileno e Poliéster, com gramatura 56gr/m2), obedecendo as normas EN 868, ISO 11607 e ABNT NBR 14990.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefinico para proteção de 19 g/m2

**2. Modelos Comerciais**

Os modelos comerciais das FERRAMENTAS PARA DRILL MÉDIA podem ser consultados no **Anexo I** ao final desta Instrução de Uso. Para mais informações consultar os catálogos técnicos disponíveis no site da Setormed <https://setormed.com.br/catalogos/>.

### **3. Indicação de Uso/ Finalidade**

AS FERRAMENTAS PARA DRILL SETORMED foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com as DRILL SETORMED (objeto de outro registro) em procedimentos cirúrgicos de osteotomia mandibular e reconstrução buco maxilo facial. As Ferramentas são utilizadas nos procedimentos onde é necessário perfurar, raspar e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos.

### **4. Princípio de Funcionamento**

O princípio de funcionamento das FERRAMENTAS PARA DRILL SETORMED é baseado na rotação do eixo interno do DRILL acionado por ar comprimido/nitrogênio. O sistema é todo pneumático necessitando apenas de uma linha de ar comprimido ou nitrogênio. A pressão necessária vai da faixa de 85 a 120 Psi. Pela ação do ar/nitrogênio as FERRAMENTAS PARA DRILL SETORMED fixadas nas extremidades da DRILL girem livremente para realizar o procedimento cirúrgico.

### **5. Modo de Uso do Produto**

- Verifique se a indicação de esterilização está correta e se o equipamento está em condição de uso;
- Gire o acionador de ajuste do Drill no sentido anti-horário até que curso total de giro seja alcançado.
- Insira a Ferramenta adequada no Drill, até que a mesma toque a extremidade interior da cavidade de colocação da ferramenta;
- Gire o acionador de ajuste do Drill em sentido horário até que o curso total de giro seja alcançado;
- Conecte o Drill à Turbina;
- Realize o procedimento cirúrgico adequado;
- O Fabricante recomenda uso único.

### **6. Composição**

Constituída em aço inoxidável ASTM F899-XM16.

### **7. Esterilização**

As FERRAMENTAS PARA DRILL SETORMED são fornecidas na condição estéril, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

## **8. Condições de Armazenamento**

Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado.

Condições de estocagem: devem ser armazenados em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostos diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C) ou contaminação particulada.

## **9. Condições de Transporte**

Os produtos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento e de sua embalagem. É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso. Não empilhar as caixas.

## **10. Condições de Manipulação**

O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada.

## **11. Advertências**

Advertências Gerais:

- Antes de utilizar as FERRAMENTAS PARA DRILL SETORMED certifique-se de ler e compreender as instruções fornecidas nas instruções de uso.
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão.
- O cirurgião deve estar ciente das técnicas artroscopia.
- O uso correto das FERRAMENTAS PARA DRILL SETORMED é extremamente importante para o sucesso na utilização.

Advertência associada à verificação do estado superficial do produto que restrinja o seu uso.

- Caso haja alguma discrepância na aparência visual (como a quebra parcial) ou mesmo algum foco do material apresente outra coloração, não utilize as FERRAMENTAS PARA DRILL SETORMED e entre em contato imediatamente com o fabricante ou distribuidor do produto.

Identificação da possibilidade de reesterilização: O fabricante recomenda o uso único!

Cuidados especiais:

- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha, aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo.
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente conduzindo a resultados não satisfatórios.
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

## **12. Precauções**

Os dispositivos de uso único são embalados em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se o dispositivo estiver em embalagem íntegra, dentro do prazo de validade.

Descarte e não use artigos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem primária somente deverá ser aberta no ato do procedimento.

Qualquer dispositivo que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não pode ser usado e deve ser descartado.

## **13. Contraindicações**

Não se aplica.

## **14. Efeitos Adversos**

Não se aplica.

## **15. Reclamação**

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado preferencialmente com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto – número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado(s) com a descrição da não conformidade.

Para informações sobre envio e formulário com a devida queixa, favor entrar em contato o mais breve possível através do e-mail [sac@setormed.com.br](mailto:sac@setormed.com.br) solicitando as informações para envio.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 e do e-mail [sac@setormed.com.br](mailto:sac@setormed.com.br) para notificações referentes ao produto.

## 16. Alerta de Instrução de Uso

Para atendimento a IN nº 04/2012, seguir o Alerta de Instrução de Uso, que contém as informações necessárias para acesso à Instrução de Uso no site da Setormed, além de informações para solicitação do documento em formato impresso.

<b>ALERTA INSTRUÇÃO DE USO</b>	
<p>Conforme Instrução Normativa da Anvisa de nº 04 de 19 junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.</p>	
<p>As <b>Instruções de Uso</b> para a correta utilização e manuseio do produto estão disponíveis no site: <a href="http://www.setormed.com.br">www.setormed.com.br</a>.</p>	
<p>Para a visualização dos arquivos utilize o software Acrobat.</p>	
<p>As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ANVISA.</p>	
<p>Todas as Instruções de Uso possuem no rodapé, a revisão e a data de revisão do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso informada no rótulo do produto.</p>	
<p>Para Instruções de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar, sem custo adicional, inclusive de envio, por meio do telefone (16) 3416-5398.</p>	
<p><b>Informações do Fornecedor:</b> SETORMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – S.A Endereço: Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP – CEP: 13570-410 Telefone: (16) 3416-5398 Horário de Atendimento: Seg. à Quinta: 08:00 às 18:00 hs e Sexta das 08:00 às 17:00 hs.</p>	
<p><b>Instruções de Uso disponível em:</b> <a href="http://www.setormed.com.br">www.setormed.com.br</a></p>	
<p>FQ-201 Revisão: 0001 Data: 06/12/2022</p>	

Figura 02: Modelo de Alerta de Instrução de Uso.

**Fabricado por:** Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**Responsável Técnico:** Antonio C. B. Pontim – CREA-SP: 0601343684

## Anexo I – Modelos Comerciais

**Tabela 1. Lista de Modelos Comerciais Ferramentas para Drill Média**

020 01 05 04	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 0,90mm x 110mm comprimento.
020 01 05 05	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,0mm x 110mm comprimento.
020 01 05 06	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,10mm x 110mm comprimento.
020 01 11 06	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,10mm x 180mm comprimento.
020 01 05 07	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,20mm x 110mm comprimento.
020 01 05 08	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,30mm x 110mm comprimento.
020 01 05 09	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,40mm x 110mm comprimento.
020 01 05 10	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,50mm x 110mm comprimento.
020 01 06 11	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,60mm x 115mm comprimento.
020 01 10 11	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,60mm x 155mm comprimento.
020 01 11 11	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,60mm x 180mm comprimento.
020 01 06 12	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,70mm x 115mm comprimento.
020 01 06 13	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,80mm x 115mm comprimento.
020 01 06 14	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,90mm x 115mm comprimento.
020 01 10 14	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 1,90mm x 155mm comprimento.
020 01 06 15	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 2,0mm x 115mm comprimento.
020 01 11 15	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 2,0mm x 180mm comprimento.
020 01 07 16	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 2,10mm x 120mm comprimento.
020 01 07 17	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 2,20mm x 120mm comprimento.
020 01 07 18	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 2,30mm x 120mm comprimento.
020 01 06 20	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 2,70mm x 115mm comprimento.
020 01 09 20	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 2,70mm x 150mm comprimento.
020 01 11 20	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 2,70mm x 180mm comprimento.
020 01 06 23	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 3,20mm x 115mm comprimento.
020 01 09 23	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 3,20mm x 150mm comprimento.
020 01 11 23	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 3,20mm x 180mm comprimento.
020 01 06 24	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 3,50mm x 115mm comprimento.
020 01 09 24	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 3,50mm x 150mm comprimento.
020 01 11 24	Broca para Buco Maxilo $\varnothing$ 3,50mm x 180mm comprimento.
020 06 04 28	Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda $\varnothing$ 5,0mm x 95mm comprimento.
020 06 08 28	Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda $\varnothing$ 5,0mm x 125mm comprimento.
020 06 04 32	Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda $\varnothing$ 7,0mm x 95mm comprimento.
020 06 08 32	Fresa Cilíndrica de Ponta Redonda $\varnothing$ 5,0mm x 125mm comprimento.

020 09 04 26	Fresa Cônica de Corte Helicoidal $\varnothing$ 4,0mm x 95mm comprimento.
020 09 04 27	Fresa Cônica de Corte Helicoidal $\varnothing$ 4,50mm x 95mm comprimento.
020 09 04 30	Fresa Cônica de Corte Helicoidal $\varnothing$ 6,0mm x 95mm comprimento.
020 05 04 28	Fresa Cônica de Ponta Redonda $\varnothing$ 5,0mm x 95mm comprimento.
020 05 08 28	Fresa Cônica de Ponta Redonda $\varnothing$ 5,0mm x 125mm comprimento.
020 05 04 32	Fresa Cônica de Ponta Redonda $\varnothing$ 7,0mm x 95mm comprimento.
020 05 08 32	Fresa Cônica de Ponta Redonda $\varnothing$ 5,0mm x 125mm comprimento.
020 07 04 16	Fresa de Corte Lateral $\varnothing$ 2,10mm x 95mm comprimento.
020 07 08 16	Fresa de Corte Lateral $\varnothing$ 2,10mm x 125mm comprimento.
020 04 06 09	Fresa Esférica de Acabamento $\varnothing$ 1,4mm x 115mm comprimento.
020 04 06 18	Fresa Esférica de Acabamento $\varnothing$ 2,30mm x 115mm comprimento
020 04 06 22	Fresa Esférica de Acabamento $\varnothing$ 3,10mm x 115mm comprimento.
020 04 06 28	Fresa Esférica de Acabamento $\varnothing$ 5,0mm x 115mm comprimento.
020 04 06 30	Fresa Esférica de Acabamento $\varnothing$ 6,0mm x 115mm comprimento.
020 04 06 32	Fresa Esférica de Acabamento $\varnothing$ 7,0mm x 115mm comprimento.
020 03 06 05	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 1,0mm x 115mm comprimento.
020 03 06 10	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 1,50mm x 115mm comprimento
020 03 06 15	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 2,0mm x 115mm comprimento
020 03 06 19	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 2,50mm x 115mm comprimento
020 03 06 21	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 3,0mm x 115mm comprimento.
020 03 06 24	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 3,50mm x 115mm comprimento.
020 03 06 26	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 4,0mm x 115mm comprimento.
020 03 06 27	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 4,50mm x 115mm comprimento.
020 03 06 28	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 5,0mm x 115mm comprimento.
020 03 06 29	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 5,50mm x 115mm comprimento.
020 03 06 30	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 6,0mm x 115mm comprimento.
020 03 06 32	Fresa Esférica de Corte Rápido $\varnothing$ 7,0mm x 115mm comprimento.
020 10 04 01	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido $\varnothing$ 0,60mm x 95mm comprimento.
020 10 04 02	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido $\varnothing$ 0,70mm x 95mm comprimento.
020 10 04 03	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido $\varnothing$ 0,80mm x 95mm comprimento.
020 10 04 05	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido $\varnothing$ 1,0mm x 95mm comprimento.
020 10 04 07	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido $\varnothing$ 1,20mm x 95mm comprimento
020 10 04 10	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido $\varnothing$ 1,50mm x 95mm comprimento
020 10 04 13	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido $\varnothing$ 1,80mm x 95mm comprimento
020 10 04 15	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido $\varnothing$ 2,0mm x 95mm comprimento
020 10 04 19	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido $\varnothing$ 2,50mm x 95mm comprimento



020 10 04 21	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido ø3,0mm x 95mm comprimento.
020 10 04 24	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido ø3,50mm x 95mm comprimento.
020 10 04 26	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido ø4,0mm x 95mm comprimento.
020 10 04 27	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido ø4,50mm x 95mm comprimento.
020 10 04 28	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido ø5,0mm x 95mm comprimento.
020 10 04 29	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido ø5,50mm x 95mm comprimento.
020 10 04 30	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido ø6,0mm x 95mm comprimento.
020 10 04 31	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido ø6,50mm x 95mm comprimento.
020 10 04 32	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido ø7,0mm x 95mm comprimento.
020 10 04 33	Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido ø8,0mm x 95mm comprimento.
020 02 04 01	Fresa Esférica de Desbaste ø0,60mm x 95mm comprimento.
020 02 08 01	Fresa Esférica de Desbaste ø0,60mm x 125mm comprimento.
020 02 04 02	Fresa Esférica de Desbaste ø0,70mm x 95mm comprimento.
020 02 08 02	Fresa Esférica de Desbaste ø0,70mm x 125mm comprimento.
020 02 04 03	Fresa Esférica de Desbaste ø0,80mm x 95mm comprimento.
020 02 08 03	Fresa Esférica de Desbaste ø0,80mm x 125mm comprimento.
020 02 04 05	Fresa Esférica de Desbaste ø1,0mm x 95mm comprimento.
020 02 08 05	Fresa Esférica de Desbaste ø1,0mm x 125mm comprimento.
020 02 04 09	Fresa Esférica de Desbaste ø1,40mm x 95mm comprimento
020 02 08 09	Fresa Esférica de Desbaste ø1,40mm x 125mm comprimento
020 02 04 13	Fresa Esférica de Desbaste ø1,80mm x 95mm comprimento
020 02 08 13	Fresa Esférica de Desbaste ø1,80mm x 125mm comprimento
020 02 04 18	Fresa Esférica de Desbaste ø2,30mm x 95mm comprimento
020 02 08 18	Fresa Esférica de Desbaste ø2,30mm x 125mm comprimento
020 02 04 20	Fresa Esférica de Desbaste ø2,70mm x 95mm comprimento
020 02 08 20	Fresa Esférica de Desbaste ø2,70mm x 125mm comprimento
020 02 04 22	Fresa Esférica de Desbaste ø3,10mm x 95mm comprimento.
020 02 08 22	Fresa Esférica de Desbaste ø3,10mm x 125mm comprimento.
020 02 04 24	Fresa Esférica de Desbaste ø3,50mm x 95mm comprimento.
020 02 08 24	Fresa Esférica de Desbaste ø3,50mm x 125mm comprimento.
020 02 04 26	Fresa Esférica de Desbaste ø4,0mm x 95mm comprimento.
020 02 08 26	Fresa Esférica de Desbaste ø4,0mm x 125mm comprimento.
020 02 04 27	Fresa Esférica de Desbaste ø4,50mm x 95mm comprimento.
020 02 08 27	Fresa Esférica de Desbaste ø4,50mm x 125mm comprimento.
020 02 04 28	Fresa Esférica de Desbaste ø5,0mm x 95mm comprimento.
020 02 08 28	Fresa Esférica de Desbaste ø5,0mm x 125mm comprimento.

020 02 04 30	Fresa Esférica de Desbaste ø6,0mm x 95mm comprimento.
020 02 08 30	Fresa Esférica de Desbaste ø6,0mm x 125mm comprimento.
020 02 04 32	Fresa Esférica de Desbaste ø7,0mm x 95mm comprimento.
020 02 08 32	Fresa Esférica de Desbaste ø7,0mm x 125mm comprimento.
020 08 01 01	Fresa Esférica Diamantada ø0,60mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 01	Fresa Esférica Diamantada ø0,60mm x 55mm comprimento.
020 08 03 01	Fresa Esférica Diamantada ø0,60mm x 70mm comprimento.
020 08 04 01	Fresa Esférica Diamantada ø0,60mm x 95mm comprimento.
020 08 08 01	Fresa Esférica Diamantada ø0,60mm x 125mm comprimento.
020 08 01 02	Fresa Esférica Diamantada ø0,70mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 02	Fresa Esférica Diamantada ø0,70mm x 55mm comprimento.
020 08 03 02	Fresa Esférica Diamantada ø0,70mm x 70mm comprimento.
020 08 04 02	Fresa Esférica Diamantada ø0,70mm x 95mm comprimento.
020 08 08 02	Fresa Esférica Diamantada ø0,70mm x 125mm comprimento.
020 08 01 03	Fresa Esférica Diamantada ø0,80mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 03	Fresa Esférica Diamantada ø0,80mm x 55mm comprimento.
020 08 03 03	Fresa Esférica Diamantada ø0,80mm x 70mm comprimento.
020 08 04 03	Fresa Esférica Diamantada ø0,80mm x 95mm comprimento.
020 08 08 03	Fresa Esférica Diamantada ø0,80mm x 125mm comprimento.
020 08 01 05	Fresa Esférica Diamantada ø1,0mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 05	Fresa Esférica Diamantada ø1,0mm x 55mm comprimento.
020 08 03 05	Fresa Esférica Diamantada ø1,0mm x 70mm comprimento.
020 08 04 05	Fresa Esférica Diamantada ø1,0mm x 95mm comprimento.
020 08 08 05	Fresa Esférica Diamantada ø1,0mm x 125mm comprimento.
020 08 01 09	Fresa Esférica Diamantada ø1,40mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 09	Fresa Esférica Diamantada ø1,40mm x 55mm comprimento.
020 08 03 09	Fresa Esférica Diamantada ø1,40mm x 70mm comprimento.
020 08 04 09	Fresa Esférica Diamantada ø1,40mm x 95mm comprimento.
020 08 08 09	Fresa Esférica Diamantada ø1,40mm x 125mm comprimento.
020 08 01 13	Fresa Esférica Diamantada ø1,80mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 13	Fresa Esférica Diamantada ø1,80mm x 55mm comprimento.
020 08 03 13	Fresa Esférica Diamantada ø1,80mm x 70mm comprimento.
020 08 04 13	Fresa Esférica Diamantada ø1,80mm x 95mm comprimento.
020 08 08 13	Fresa Esférica Diamantada ø1,80mm x 125mm comprimento.
020 08 01 15	Fresa Esférica Diamantada ø2,0mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 15	Fresa Esférica Diamantada ø2,0mm x 55mm comprimento.

020 08 03 15	Fresa Esférica Diamantada ø2,0mm x 70mm comprimento.
020 08 04 15	Fresa Esférica Diamantada ø2,0mm x 95mm comprimento.
020 08 08 15	Fresa Esférica Diamantada ø2,0mm x 125mm comprimento.
020 08 01 18	Fresa Esférica Diamantada ø2,30mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 18	Fresa Esférica Diamantada ø2,30mm x 55mm comprimento.
020 08 03 18	Fresa Esférica Diamantada ø2,30mm x 70mm comprimento.
020 08 04 18	Fresa Esférica Diamantada ø2,30mm x 95mm comprimento.
020 08 08 18	Fresa Esférica Diamantada ø2,30mm x 125mm comprimento.
020 08 01 19	Fresa Esférica Diamantada ø2,50mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 19	Fresa Esférica Diamantada ø2,50mm x 55mm comprimento.
020 08 03 19	Fresa Esférica Diamantada ø2,50mm x 70mm comprimento.
020 08 04 19	Fresa Esférica Diamantada ø2,50mm x 95mm comprimento.
020 08 08 19	Fresa Esférica Diamantada ø2,50mm x 125mm comprimento.
020 08 01 20	Fresa Esférica Diamantada ø2,70mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 20	Fresa Esférica Diamantada ø2,70mm x 55mm comprimento.
020 08 03 20	Fresa Esférica Diamantada ø2,70mm x 70mm comprimento.
020 08 04 20	Fresa Esférica Diamantada ø2,70mm x 95mm comprimento.
020 08 08 20	Fresa Esférica Diamantada ø2,70mm x 125mm comprimento.
020 08 01 21	Fresa Esférica Diamantada ø3,0mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 21	Fresa Esférica Diamantada ø3,0mm x 55mm comprimento.
020 08 03 21	Fresa Esférica Diamantada ø3,0mm x 70mm comprimento.
020 08 04 21	Fresa Esférica Diamantada ø3,0mm x 95mm comprimento.
020 08 08 21	Fresa Esférica Diamantada ø3,0mm x 125mm comprimento.
020 08 01 24	Fresa Esférica Diamantada ø3,50mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 24	Fresa Esférica Diamantada ø3,50mm x 55mm comprimento.
020 08 03 24	Fresa Esférica Diamantada ø3,50mm x 70mm comprimento.
020 08 04 24	Fresa Esférica Diamantada ø3,50mm x 95mm comprimento.
020 08 08 24	Fresa Esférica Diamantada ø3,50mm x 125mm comprimento.
020 08 01 26	Fresa Esférica Diamantada ø4,0mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 26	Fresa Esférica Diamantada ø4,0mm x 55mm comprimento.
020 08 03 26	Fresa Esférica Diamantada ø4,0mm x 70mm comprimento.
020 08 04 26	Fresa Esférica Diamantada ø4,0mm x 95mm comprimento.
020 08 08 26	Fresa Esférica Diamantada ø4,0mm x 125mm comprimento.
020 08 01 27	Fresa Esférica Diamantada ø4,50mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 27	Fresa Esférica Diamantada ø4,50mm x 55mm comprimento.
020 08 03 27	Fresa Esférica Diamantada ø4,50mm x 70mm comprimento.

020 08 04 27	Fresa Esférica Diamantada ø4,50mm x 95mm comprimento.
020 08 08 27	Fresa Esférica Diamantada ø4,50mm x 125mm comprimento.
020 08 01 28	Fresa Esférica Diamantada ø5,0mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 28	Fresa Esférica Diamantada ø5,0mm x 55mm comprimento.
020 08 03 28	Fresa Esférica Diamantada ø5,0mm x 70mm comprimento.
020 08 04 28	Fresa Esférica Diamantada ø5,0mm x 95mm comprimento.
020 08 08 28	Fresa Esférica Diamantada ø5,0mm x 125mm comprimento.
020 08 01 29	Fresa Esférica Diamantada ø5,50mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 29	Fresa Esférica Diamantada ø5,50mm x 55mm comprimento.
020 08 03 29	Fresa Esférica Diamantada ø5,50mm x 70mm Comprimento.
020 08 04 29	Fresa Esférica Diamantada ø5,50mm x 95mm comprimento.
020 08 08 29	Fresa Esférica Diamantada ø5,50mm x 125mm comprimento.
020 08 01 30	Fresa Esférica Diamantada ø6,0mm x 44,5mm comprimento.
020 08 02 30	Fresa Esférica Diamantada ø6,0mm x 55mm comprimento.
020 08 03 30	Fresa Esférica Diamantada ø6,0mm x 70mm comprimento.
020 08 04 30	Fresa Esférica Diamantada ø6,0mm x 95mm comprimento.
020 08 08 30	Fresa Esférica Diamantada ø6,0mm x 125mm comprimento.